



# Hjælpemidler til personer med hukommelsesbesvær eller demens



Center for Sundhed og Omsorg  
Velfærdsteknologisk Team  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse

## VELFÆRDSTEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER

Velfærdsteknologi er en fællesbetegnelse for teknologi inden for blandt andet pleje, omsorg, sygdomsbehandling og forebyggelse.

I Slagelse Kommunes arbejde med de velfærdsteknologiske hjælpemidler, har vi fokus på at styrke borgerens selvhjulpenhed.

Vi vil støtte og motivere borgeren til at være mest mulig selvhjulpen. Velfærdsteknologi skal lette og understøtte hverdagen for borgeren og øge den enkeltes livskvalitet.

# Indhold



Gode råd, hjælp og ideer.....	4
Velfærdsteknologisk Udstillingslejlighed.....	4
Demens-teknologi-bibliotek.....	5
Aktiviteter og tilbud.....	6
Pårørende.....	7
Gode råd om indretning.....	8

## Katalog over hjælpemidler

App der hører for dig.....	9
GPS-brik.....	10
Nat- og dagkalender med udskifteligt billede.....	11
Plys kæledyr.....	12
Billedtelefon med forstærker.....	13
Mobiltelefon.....	14
Empati-dukke.....	15
Kompressionsvest.....	16
Kuglevest.....	17
Kuglefodpude.....	18
Kuglestol.....	19
Kugledyne.....	20
Knættæppe med kugler.....	21
Fjernbetjening.....	22
Pilleæske med sms-alarm.....	23
Rund pilleæske med alarm.....	24
Firkantet pilleæske med alarm.....	25
Ugedoseringsæske med timer.....	26
Husk'ofon.....	27

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk



# Gode råd, hjælp og ideer



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk



### Demenskonsulenterne

Her henvender du dig for vejledning, rådgivning og støtte til den demente og dennes pårørende gennem sygdomsforløbet.

I Slagelse Kommune tilbyder demenskonsulenterne bl.a.:

- Hjemmebesøg med henblik på afklaring af hjælpebehov
- Hjælp og støtte til det videre forløb i samarbejde med egen læge og hjemmeplejen.
- Støtte til familien og dermed mulighed for at forlænge demente borgers ophold i eget hjem
- Støtte til at undgå akutte situationer

Læs mere om demenskonsulenternes tilbud på Slagelse Kommunes hjemmeside - [www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/demens](http://www.slagelse.dk/borger/aeldre-og-omsorg/demens).



### Hjælpemiddelafdelingen

Stedet hvor du kan ansøge om et hjælpemiddel efter Servicelovens §112, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at hjælpemidlet vil gøre dagligdagen væsentlig lettere.

Du kan søge om hjælpemidlet på Slagelse Kommunes hjemmeside - [www.slagelse.dk/selvbetjening/hjaelpemidler-soeg-om](http://www.slagelse.dk/selvbetjening/hjaelpemidler-soeg-om). Afdelingen ligger på Industrivej 9 i Slagelse og kan kontaktes på tlf. 58 57 36 00 mellem kl. 9-12:30 - torsdag tillige kl. 15-16:30.




### Velfærdsteknologisk udstillingslejlighed

Her har du mulighed for at se en lejlighed, der er indrettet med spændende teknologi og andre hjælpemidler, som kan være med til at gøre hverdagen lettere. Kig forbi og bliv inspireret til et godt og selvstændigt liv med øget livskvalitet - på trods af din funktionsnedsættelse. Pårørende, medarbejdere og andre interesserede er også velkommen. Læs mere om lejligheden på vores hjemmeside: [vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk).



# Demens-teknologi-bibliotek

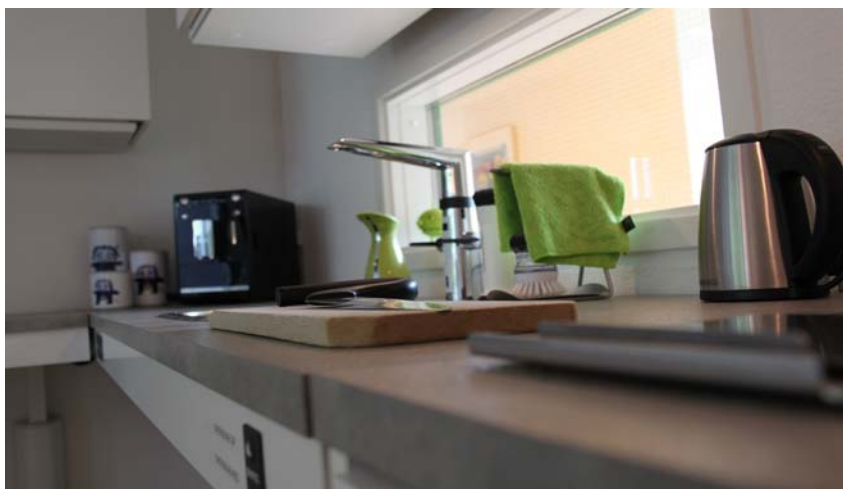

Der er mulighed for at låne et hjælpemiddel med hjem, for at afprøve om det virker for dig.

Biblioteks-tanken udspringer af et ønske om, at Slagelse Kommune udvider rådgivningen til borgere med en demenssygdom til også at omfatte rådgivning om teknologi. Med dette bibliotek er det muligt at rådgive om anvendelse af teknologi, samt afprøve teknologien hos den enkelte borger.

## Afprøvning i eget hjem

Biblioteket består af en række teknologier, der kan lette hverdagen for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. I samarbejde med kommunens demenskonsulenter kan borgere afprøve relevante teknologier fra biblioteket med det formål at se, om en given teknologi har den ønskede gevinst i borgerens liv.

## Offentlig og privat finansiering

Slagelse Kommune har valgt at udvide demens-teknologi-biblioteket med teknologier, som borgeren selv har mulighed for at investere i. Borgeren kan derfor ansøge kommunen om nogle teknologier i biblioteket, mens borgeren selv har mulighed for at investere i andre teknologier. Denne udvidelse af biblioteket giver kommunen mulighed for at understøtte borgerens behov bedst muligt gennem en rådgivende service, der omfatter hele borgerens liv.

Borgere, der ønsker rådgivning i forbindelse med demens-teknologi-biblioteket, kan henvende sig til demenskonsulenterne (se kontaktoplysninger i højre side).

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk



# Aktiviteter og tilbud



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

## Aktiviteter for borgere med demens

Borgere med demens kan deltage i aktiviteter med andre ligestillede på kommunens daghjem. Aktiviteterne er forskellige på de enkelte daghjem, men der er lagt stor vægt på hjemlige aktiviteter, og tilbuddet bliver tilpasset borgeren med demens. Demenskonsulenterne vurderer, om tilbuddet er noget for den pågældende borger.

Du skal kontakte demenskonsulenterne for at deltage i aktiviteterne på daghjemmene (Amaliehaven i Slagelse, Havestuen i Boeslunde og Aktivitetshuset i Korsør).

## Foreningen Sjøv Motion

Sjøv Motion er en forening for borgere med hukommelsesbesvær og demens - og deres pårørende. Der er oprettet cafeer rundt om i kommunen, hvor der er træning en gang om ugen med efterfølgende hyggeligt samvær. Læs mere på hjemmesiden [www.motionscafeer.dk](http://www.motionscafeer.dk).

## Kørselsordning

Hvis borgeren med demens ikke kan transportere sig selv til aktiviteter i daghjemmet, kan man søge om kørselsordning hos demenskonsulenterne.

## Aflastning

Kommunen tilbyder dagaflastning på hverdage i kommunens daghjem for borgere med demens. Tilbuddet gives til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer borgeren med demens. Det er den pårørende, der skal søge om opholdet.

Den pårørende skal selv sørge for transport til og fra daghjemmet samt medbringe eventuel medicin og hjælpemidler. Der skal betales for forplejningen.

Kommunen behandler ansøgningen på baggrund af en individuel og konkret vurdering af den pårørendes behov. Hvis du ønsker at søge om aflastning, skal du kontakte Visitationen på tlf. 58 57 45 00





## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
[demens@slagelse.dk](mailto:demens@slagelse.dk)

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
[linra@slagelse.dk](mailto:linra@slagelse.dk)

### Pårørendegrupper ved demens

Som pårørende til en borger med demens er du udsat for et stort fysisk og psykisk pres under sygdommens udvikling, da du selvfølgelig vil yde den bedste hjælp og omsorg.

Ofte har du ikke overskud til at vise de nødvendige hensyn til din egen hverdag. Et arbejde skal måske passes, praktiske opgaver i hverdagen skal planlægges og ordnes - samtidig med at din pårørende med demens skal skånes og alligevel inddrages mest muligt.

Det kan være en hjælp at tale med andre i samme situation, og demenskonsulenterne opretter derfor pårørendegrupper efter behov. I pårørendegruppen er der stor vægt på tryghed, fordi gruppen skal være et fristed, hvor du møder ligesindede. Den enkelte gruppe bliver sammensat af demenskonsulenterne efter en individuel samtale.

### Pårørendegrupper under foreningen Sjøv Motion

Foreningen Sjøv Motion tilbyder ugentlig træning til borgere med demens og eventuelt deres pårørende. De har desuden oprettet en gruppe, hvor pårørende kan støtte hinanden, og hvor der tilbydes foredrag og sparring med kommunens demenskonsulenter.



# Gode råd om indretning



Generelt er det vigtigt at tænke i visuel orientering i boligen, så den demente kan skelne tingene fra hinanden. Det kan f.eks. være:

- Placering af stol, så man kan se køkken, soveværelse og badeværelse fra den
- Sikre ryddelighed
- Toiletbræt med farve
- Tallerken med farvet kant
- Dug i kontrastfarve
- Stribe på gulvet eller lys - for at lede den demente hen til toilettet
- Lyse farver på væggene
- Undgå mørke dørmåtter/gulvflader, da de kan fremstå som et sort hul for personer med demens
- Lange gange bør varieres/farves for at skabe variation og lette orienteringen hos demente
- Sensorbelysning, f.eks. lamper, der tænder, når der er bevægelse i rummet.
- Sløring af udgangsdøre med f.eks. tapet
- Undgå genspejl fra vinduer og lign.
- Køkkenskabe med glaslåger, så man kan se indholdet.

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk



# App der husker for dig



## Hvad er denne app?

Det er en applikation (program) til smartphone eller tablet, designet til at understøtte hukommelsen samt strukturere hverdagen for mennesker med hukommelsesbesvær. Applikationen er dels et kalenderredskab, dels et vejledningsværktøj i hverdagens gøremål.

## Hvad bruger man app'en til?

Via modulet "Gennemgange" kan der oprettes simple trin-for-trin instrukser med egne billeder og tekst, som kan understøtte brugeren i hverdagen - for eksempel hvordan man laver kaffe og vasker tøj.

For at udføre en aktivitet følger brugeren de forskellige trin i den pågældende gennemgang, fra start til slut. Gennemgangene kan dels lægges ind som en opgave i kalenderen - eksempelvis sætte kaffe over, fordi man får gæster - eller der kan anvendes små chips, der kan lægges ved kaffemaskinen. Når brugeren lægger sin smartphone eller tablet oven på chippen, starter gennemgangen af, hvordan brugeren skal lave kaffe, fra start til slut. Hermed får brugeren hjælp til at opnå mere struktur i sin hverdag, og kan forbyde mere selvhjulpen.

## Hvem kan have glæde af app'en?

Personer med let demens (der er vant til at anvende smartphone/tablet)

## Tekniske data:

Kræver smartphone eller tablet.

**carePlan inmente - HMI-nr.:** 80010.

(Kræver licens fra e-mergency.dk samt smartphone/tablet)

Kan søges som et  
hjælpemiddel efter  
servicelovens §112

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

### Hvad er en GPS-brik?

Den lille GPS-brik gør det muligt nemt og hurtigt at lokalisere brugeren ved hjælp af den medfølgende app eller via computeren. Brugeren bærer den lille GPS-brik på sig i en snor om halsen, i den medfølgende bæltetaske eller løst liggende i lommen eller tasken.

### Hvad bruger man GPS-brikken til?

GPS-brikken gør det muligt for brugeren fortsat at kunne bevæge sig rundt på egen hånd, idet pårørende/personale via smartphone eller computer let kan spore, hvor brugeren er henne. Der er indbygget to-vejs kommunikation i GPS-brikken, så tilknyttede telefonnumre kan ringe op og tale med brugeren, ligesom brugeren ved tryk på telefon-knappen kan komme ringe op til et indkodet telefonnummer. Der er desuden mulighed for at etablere et geografisk "hegn", så der går en alarm hos de tilknyttede telefonnumre/computere, såfremt brugeren bevæger sig uden for "hegnet".

### Hvem kan have glæde af GPS-brikken?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer, der har svært ved at finde hjem.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har svært ved at finde hjem.

### Tekniske data:

Størrelse: 5,4 cm x 4 cm x 1,6 cm  
Batterilevetid: 20-30 timer  
Kommunikation: Mulighed for to-vejs tale  
Opladningstid: Ca. 3 timer.  
Mulighed for geo-fence  
Alarm ved lav batteristand  
Vandtæt

Anskaffes typisk som  
privat indkøb

**Care Tracker, GPS-brik - HMI-nr.: 81280** (Kræver abonnementsaftale med StellaCare)



# Nat- og dagkalender



med udskifteligt billede

## Hvad er en Nat- og dagkalender?

Nat og Dag kalenderen er en elektronisk tidskalender, som viser ugedag, dato og om det er morgen, eftermiddag, aften eller nat i displayet. Kalenderen sluttes til strømnettet med en adapter. Der er batteri-backup, så den altid viser den korrekte ugedag og dato.

## Hvad bruges en Nat- og dagkalender til?

Kalenderen viser brugeren hvilken dato og ugedag samt hvilket tidspunkt på dagen, det er (morgen, dag, aften eller nat). Dermed undgår brugeren at skulle spørge andre om, hvilken dag/tidspunkt på dagen, det er.

## Hvem kan have glæde af Nat- og dagkalender?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

## Tekniske data:

Størrelse og vægt: 24 cm x 18 cm; 480 gram.

Strømforsyning samt batteri-backup; batteriet holder ca. 1 år, hvis det alene anvendes.

**HMI-nr.:** 64606 (Vejl. pris 1.120 kr.)

Kan søges som et  
hjælpe middel efter  
servicelovens §112

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

# Plys kæledyr



## Hvad er et plys kæledyr?

Plys kæledyrene er meget naturtro hundehvalpe og kattekillinger, der kan trække vejret og snorke let. De fås i flere forskellige racer og farver.

## Hvad bruges plys kæledyret til?

De trygt sovende kæledyr kan være velegnede som såvel et terapeutisk redskab som til selskab for demente.

Dyrene ligger fredeligt og sover, og man kan se de trækker vejret samtidig med, der høres en let snorken. Dette gør, at dyrene skaber tryghed og hygge omkring sig.

## Hvem kan have glæde af et plys kæledyr?

- Personer, der grundet fremskreden demens er svære at kommunikere med.
- Personer med demens, der har svært ved at være i aktivitet, eller mangler nogle at give omsorg til og få omsorg fra.

## Tekniske data:

Størrelse: L: 24 cm, B: 20 cm, H: 12 cm.

PetMe købes på [www.petme.dk](http://www.petme.dk) - Vejl. pris 350 kr.

Anvendes typisk til aktivitet på plejehjem og aktivitetscentre

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage mellem kl. 8-9)  
[demens@slagelse.dk](mailto:demens@slagelse.dk)

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30 eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
[linra@slagelse.dk](mailto:linra@slagelse.dk)

# Billedtelefon m. forstærker



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

### Hvad er en billedtelefon?

Det er en telefon, der er velegnet til personer, der har svært ved at huske telefonnumre, idet der er mulighed for at sætte billeder ind på op til fire indkodede telefonnumre.

### Hvad bruges billedtelefonen til?

Foruden muligheden for at anvende billeder til indkodede telefonnumre, forstærker den også lyden, har et visuelt ringesignal og en forbedret kompatibilitet med høreapparater. Mulighed for, hvis nødvendigt, at afskærme nummertasterne, så kun fototasterne er synlige.

### Hvem kan have glæde af en billedtelefon?

- Personer med demens/hukommelsesbesvær
- Personer med nedsat syn
- Personer med hørenedsættelse

### Tekniske data:

Skal tilsluttes en almindelig fastnetforbindelse

**Doro MemoryPlus 319I PH - HMI-nr.: 48070** (Vejl. pris ca. 500 kr.)

Kan søges som et  
hjælpemiddel efter  
servicelovens §112



# Mobiltelefon



## Hvad er en Doro mobiltelefon?

Dette er en enkel og meget brugervenlig mobiltelefon.

Kun de allervigtigste funktioner er medtaget: Den kan besvare og foretage opkald, modtage SMS-beskeder og foretage nødopkald. Mobilen har fire hurtigvalgstaster, der betyder, at borgeren med kun ét tryk kan ringe pårørende op.

## Hvad bruges mobiltelefonen til?

På bagsiden af telefonen sidder en tryghedsknap. Skulle brugeren f.eks. falde eller pludselig blive dårlig, skal han/hun trykke på tryghedsknappen i tre sekunder. Så vil der med det samme blive sendt en automatisk SMS til alle indtastede nød-kontaktpersoner.

Der er indbygget GPS-funktion, der gør det muligt for de indtastede nød-kontaktpersoner at se, hvor brugeren befinder sig.

Telefonen har også en sikkerhedstimer, man kan aktivere, og sætte til x antal minutter eller timer. Deaktiveres sikkerhedstimeren ikke inden den valgte tidsgrænse, vil nød-kontaktpersonerne blive kontaktet. Denne funktion kan f.eks. bruges, hvis brugeren er bange for at skulle falde under et bad.

## Hvem kan have glæde af denne mobiltelefon?

- Personer med demens
- Personer med nedsat syn

**Doro Secure 580 - HMI-nr.:** 84709 (Vejl. pris ca. 1.000 kr.)

Anskaffes typisk som  
privat indkøb

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

# Empati-dukker



## Hvad er empati-dukken?

Dukkerne er bløde, varme at røre ved og har en personlig udstråling. Deres ansigtsudtryk og intense blik kan vække sympati og omsorgsfølelse. Dukkerne er tunge i numsen, og har dermed en god balance og er behagelige at holde på.

## Hvad bruges empati-dukken til?

Dukken kan vække medfølelse og indbyder til "samtale". Dukkens ansigtsudtryk og intense blik kan vække børns og voksnes sympati og omsorgsfølelse.

Når dukken holdes på venstre arm, som et lille barn, opnås der øjenkontakt mellem dukken og personen der holder den. Hvis brugeren opnår en følelse af samhørighed med dukken, vil denne nærhed, berøring og varme stimulere brugeren til at slappe af og falde til ro.

## Hvem kan have glæde af empati-dukken?

- Personer, der grundet fremskreden demens er svære at kommunikere med.
- Personer med demens, der har svært ved at være i aktivitet, eller mangler nogle at give omsorg til og få omsorg fra.

## Tekniske data:

Størrelse og vægt: 50 cm og 700 gram / 38 cm og 640 gram

Dukken Mia/Bella -  
Vejl. pris ca. 562,50/325 kr.

Anskaffes typisk som  
privat indkøb

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk



# Kompressionsvest



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

### Hvad er en kompressionsvest?

En kompressionsvest er en vest med tynde, indsyede kanaler, der ved hjælp af en lille håndpumpe kan pumpes op. Hermed opnås et tryk på kroppen, hvilket stimulerer berøringssansen og derigennem også muskel- og led-sansen. Vesten anvendes af personer med psykisk og motorisk uro, som har svært ved at finde ro.

### Hvad bruges kompressionsvest til?

De mange sanseindtryk, vesten giver, medfører en bedre afgrænsning og fornemmelse for kroppen, hvilket virker beroligende og giver tryghed og dermed øget velvære.

### Hvem kan have glæde af en kompressionsvest?

- Personer med psykisk og motorisk uro.
- Personer med demens.
- Personer, der har glæde af en kuglevest, men hvor kuglevesten føles for tung.

**Squeeze-kompressionsvest** - HMI-nr.: 78201/78202/78203 (Vejl. pris 2.425 kr.)

Kan søges som et  
hjælpemiddel efter  
servicelovens §112





# Kuglevest



## Hvad er en kuglevest?

Vesten er lavet i et elastisk stof, der sidder tæt ind til kroppen. Den er designet med kanaler foran og bagpå, som er fyldt med tunge plastikkugler. Vesten lukkes med en lynlås og har et enkelt snoresystem i ryggen og siderne, som gør det nemt at tilpasse vesten individuelt, så brugeren får mest mulig stimulering.

## Hvad bruges en kuglevest til?

Vestens specielle design giver punktvis tryk på huden og stimulerer følelsen og derigennem også muskel- og ledsansen. De mange sanseindtryk giver, via impulser til centralnervesystemet, en bedre kropsfornemmelse, hvilket virker beroligende, giver tryghed og mærkes som et øget velvære. Vesten anvendes eksempelvis af personer med psykisk og motorisk uro, som har svært ved at finde ro.

## Hvem kan have glæde af en kuglevest?

- Personer med demens.
- Personer med motorisk og psykisk uro.
- Personer med ADHD.
- Personer med demens.
- Personer med hjerneskade.

**Protac MyFit kuglevest** - Vejl. pris 2.625 kr. - 3.625 kr.

Kan søges som et  
hjælpemiddel efter  
servicelovens §112

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

# Kuglefodpude



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

### Hvad er en kuglefodpude?

Det er en fodpude med kugler, der virker sansestimulerende og dermed giver jordforbindelse og skaber ro og koncentration. Den består af en bund lavet af skum og et øvre lag af løst liggende kugler i et elastisk yderbetræk.

### Hvad bruges kuglefodpuden til?

Den bruges som en dynamisk fodpude, hvor personer med behov for stimulation gennem berøringssansen og muskel- og ledsansen bliver stimuleret, når fødderne trykker mod kuglerne.

### Hvem kan have glæde af kuglefodpuden?

- Personer med demens.
- Personer med ADHD.
- Personer med autisme.
- Personer med motorisk og psykisk uro.

### Tekniske data:

Protac GroundMe fodpude fås i to højder, 10cm og 20cm

**Protac GroundMe fodpude - HMI-nr.:** 71828 (Vejl. pris 1.237,50 kr.)

Kan søges som et  
hjælpemiddel efter  
servicelovens §112



# Kuglestol



## Hvad er en kuglestol?

Kuglestolen er lavet i forskellige kassetter med plastikkugler i sædet, ryggen og nakke-/sidevinger og med Krøjerkugler i bunden og nakkepudden. Sidevingerne er lavet som lange vinger, der kan lægges ind over kroppen. Selve sædet har en fast kerne af skumgummi, hvilket gør det nemmere at rejse sig fra den.

Det specielle design af kuglestolen giver en tæt omslutning af kroppen, samtidig med at man får øget sansestimulering.

## Hvad bruges kuglestolen til?

De mange kugler i stolen giver punktvis tryk på huden og stimulerer følesansen og derigennem også muskel- og ledsansen. De mange sanseindtryk stolen kan give en bedre kropsfornemmelse, hvilket virker beroligende, giver tryghed og mærkes som et øget velvære.

## Hvem kan have glæde af kuglestolen?

- Personer, som har brug for sansestimulering, for eksempel grundet en diffus kropsfornemmelse.
- Personer med demens, som har motorisk og psykisk uro.

## Tekniske data:

Fås også uden fast kerne, i to forskellige størrelser.

**Protac SenSit Straight kuglestol - HMI-nr.: 84919 (Vejl. pris 16.500 kr.)**

Anskaffes typisk som  
privat indkøb

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

# Kugledyne



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

## Hvad er en kugledyne?

Det er en dyne, hvor indholdet består af plastikugler samt granulat fordelt i 40 kassetter, så dynen lægger sig tæt og trygt omkring kroppen.

## Hvad bruges kugledynen til?

Den stimulerer sanserne, og er med til at skabe øget kropsbevidsthed. Denne sansestimulation virker hæmmende og organiserende på impulser til centralnervesystemet. Det skaber en øget fornemmelse af kroppen og dens grænser. Kugledynen virker derfor beroligende og skaber tryghed. Mange bruger kugledynen såvel til at sove med som til at finde ro om dagen.

## Hvem kan have glæde af en kugledyne:

- Personer med søvnproblemer.
- Personer med motorisk og psykisk uro.
- Personer med stress og angst eller depression.
- Personer med ADHD.
- Personer med demens.
- Personer med smerter.
- Personer med hjerneskade.

## Tekniske data:

Dynen kan deles i to og vaskes i almindelig vaskemaskine.

**Protac Classic kugledyne - HMI-nr.: 79503 (Vejl. pris 4.500 kr.)**

Anskaffes typisk som  
privat indkøb



# Knætæppe med kugler



## Hvad er et knætæppe med kugler ?

Det er et sansestimulerende knætæppe, der hjælper unge, voksne og ældre med motorisk og psykisk uro. Knætæppet indeholder en pose med specielle, tunge plastiklugler, som ligger i sydekanaler.

## Hvad bruges et knætæppe med kugler til?

Når tæppet lægges hen over skødet på brugeren, bidrager kuglernes tyngde og tryk til en tydelig afgrænsning af kroppen og skaber ro og tryghed. Knætæppet kan f.eks. anvendes i en hvilestol, kørestol eller siddende ved spisebordet under forskellige aktiviteter i løbet af dagen. På oversiden af knætæppet er der en stor lomme, som kan bruges til at lægge velkendte genstande i, som brugeren holder af at røre ved og undersøge med hænderne. I lommen er der endvidere en strop, hvor man kan fastgøre taktile ting eksempelvis nøgler. Knætæppet har et bælte (to stropper med velcro), der gør det muligt at fastgøre det rundt om livet på brugeren, så det ikke glider ned.

## Hvem kan have glæde af et knætæppe med kugler?

- Personer med motorisk eller psykisk uro.
- Personer med demens.
- Personer med følger efter en hjerneblødning
- Personer med Parkinsons.
- Personer, der er hyperaktive

Kan søges som et hjælpemiddel efter servicelovens §112

## Tekniske data:

KneedMe knætæppet vejer 4 kg og har et aftageligt, vaskbart betræk.

**Protac KneedMe - HMI-nr.:** 79294 (Vejl. pris 1.693 kr.)

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30 eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk



# Fjernbetjening



## Hvad er en Doro fjernbetjening?

Det er en universal-fjernbetjening med kun de allermest nødvendige taster: Volumen, kanal op/ned, tænd/sluk samt video/dvd. Fjernbetjeningen kodes nemt til det eksisterende fjernsyn ved hjælp af fjernsynets oprindelige fjernbetjening.

## Hvad bruges fjernbetjeningen til?

Den gør det mere simpelt og overskueligt at anvende en fjernbetjening, da den kun har de hyppigst anvendte taster. Tasterne er større, ligesom farvekontrasten gør, at tasterne er nemme at få øje på.

## Hvem kan have glæde af fjernbetjeningen?

- Personer med dårligt syn.
- Personer med demens.

**Doro HandleEasy 321 - HMI-nr.: 49936** (Vejl. pris ca. 230 kr.)

Anskaffes typisk som  
privat indkøb

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

# Pilleæske med sms-alarm



## Hvad er en pilleæske med sms-alarm?

Det er en automatisk pilleæske, som påminder brugeren om at det er tid til at tage sin medicin, ved at udsende et lydsignal og et blinkende lys. Den rette dosis bliver tilgængelig til den rette tid.

## Hvad bruges pilleæsken med sms-alarmentil?

Pilleæsken alarmerer brugeren med lys og lyd, og man kan selv indstille hvor lang tid brugeren skal have til at tage sin medicin. Overskrides denne tid, afsendes der en sms eller e-mail. Når pilleæsken skal afgive alarm, roterer kassetten, og gør den næste dosis tilgængelig under en åbning i låget. Man tager medicinen ved at vende æsken på hovedet, så pillerne falder ud. Når man vender den, stopper alarmen og lyssignalet. Medicinen doseres i en kassette med 28 bakker. Det maksimale antal af daglige påmindelser er 28 gange.

## Hvem kan have glæde af en pilleæske med sms-alarm?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

### Tekniske data:

Antal mulige doseringer: 28

Alarm type: Lyd og/eller lys. Tages dosis ikke, sendes sms eller e-mail.

Kommunikation: Kræver telefonabonnement

**Careousel GSM pilleæske - HMI-nr.:** 63385 (Vejl. pris 3.995 kr.)

Anskaffes typisk som  
privat indkøb

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

# Rund pilleæske med alarm



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

### Hvad er en rund pilleæske med alarm?

Den kan indstilles til at afgive fem daglige alarmer, med lyd og vibration, når det er tid til at tage medicin. Alarmen gentages indtil medicinlåget drejes. Kun ét medicinrum kan være åbent ad gangen, og på displayet angives, hvilket medicinrum, der skal åbnes.

### Hvad bruges en rund pilleæske med alarm til?

Pilleæske er velegnet til personer, der følger et fast medicinskema. Alarmen gentages to gange hvert femte minut, såfremt medicinlåget ikke drejes.

### Hvem kan have glæde af en rund pilleæske med alarm?

- Personer, der følger et fast medicineringskema.
- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

### Tekniske data:

Antal rum: 5  
Rumstørrelse: 10 ml  
Alarm: Op til 5 daglige  
Alarmtype: Lyd og vibration  
Størrelse og vægt: 8,2 cm i diameter, 3,2 cm høj. 96 gram.

**MiniTell pilleæske - HMI-nr.:** 53957 (Vejl. pris 449 kr.)

Anskaffes typisk som  
privat indkøb



# Firkantet pilleæske m. alarm



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

### Hvad er en firkantet pilleæske med alarm?

Den har 8 separate, nummererede pilerum og kan indstilles til 8 daglige alarmer. Pilleæsken giver alarm med både lys og lyd.

### Hvad bruges en firkantet pilleæske med alarm til?

Pilleæsken anvendes til at hjælpe brugeren med at huske at tage sin medicin på faste tidspunkter.

### Hvem kan have glæde af en firkantet pilleæske med alarm?

- Personer, der følger et fast medicineringskema.
- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

### Tekniske data:

Antal rum: 8  
Antal daglige alarmer: 8  
Alarmtype: Lyd og lys  
Størrelse: 3 cm høj/6 cm bred/12 cm lang

**Super 8 pilleæske - HMI-nr.:** 73483 (Vejl. pris 450 kr.)

Anskaffes typisk som  
privat indkøb



# Ugedoseringsæske m. timer



med timer

## Hvad er ugedoseringsæske med timer?

Ugedoseringsæsken har en timer med en doseringsboks til hver dag i ugen. Timeren kan indstilles til fire alarmer i løbet af en dag. Hvis man glemmer en alarm, bipper timeren hvert 3. minut i 30 minutter eller indtil den slås fra. Glemte alarm kan også ses ved, at alarmikonet blinker.

## Hvad bruges ugedoseringsæsken med timer til?

Den minder brugeren om at tage sin medicin på faste tidspunkter. Skal man ud af huset en dag, kan man tage timeren ud af rammen og klikke dagens medicinæske fast på timeren.

## Hvem kan have glæde af ugedoseringsæske med timer?

- Personer, der følger et fast medicineringskema.
- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

## Tekniske data:

Størrelse: 18,8 cm x 10,4 cm x 2,2 cm

Med magnet, så æsken kan placeres på køleskabet.

**Seagull ugedoseringsæske med timer - HMI-nr.: 71227 (Vejl. pris 149,95 kr.)**

Anskaffes typisk som  
privat indkøb

## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

# Mem-X Husk'ofon



## Her kan du få hjælp

### Rådgivning & vejledning

Demenskonsulenterne  
Langes Gård 12, 2. sal  
4200 Slagelse  
Tlf. 58 57 33 40 (hverdage  
mellem kl. 8-9)  
demens@slagelse.dk

### Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse  
Åbent tirsdag kl. 9:30-11:30  
eller efter aftale.  
[vtlejlighed.slagelse.dk](http://vtlejlighed.slagelse.dk)

Kontaktperson:  
Udviklingsterapeut  
Line Rasmussen  
Mobil 30 56 63 01  
linra@slagelse.dk

## Hvad er en Mem-X Husk'ofon?

Mem-X Husk'ofon er et kognitivt værktøj, der ved at afspille forprogrammede talemæssige besked på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, ugen eller på specielle datoer/tidspunkter minder brugeren om, hvad der skal huskes. Når det er tid til, at en besked skal aflyttes, vil apparatet afgive en tydelig alarm, hvorefter brugeren skal trykke på en knap for at høre den indtalte besked.

## Hvad bruges en Mem-X Husk'ofon til?

Eksempelvis:

- Daglig besked: "Klokken er 8. Det er tid til at tage din morgenmedicin. Husk at drikke et glas vand til".
- Ugentlig besked: "Dit yndlingsprogram starter på DR1 om 5 minutter".
- Enkeltstående besked: "Husk Peters fødselsdag i dag. Peters telefonnummer er i din sorte adressebog".

## Hvem kan have glæde af Mem-X Husk'ofon?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

## Tekniske data:

Størrelse og vægt: 11,4 x 4,1 x 1,9 cm – 65 gram.

HMI-nr.: 5471 (Vejl. pris 1.495 kr.)

Anskaffes typisk som  
privat indkøb





Center for Sundhed og Omsorg  
Velfærdsteknologisk Team  
Sdr. Stationsvej 6  
4200 Slagelse

Dette katalog henvender sig til personer med hukommelsesbesvær eller demens, pårørende og fagpersoner, der i det daglige hjælper borgere med demens.

Vi har samlet en udpluk af produkter, hvor nogle kan ansøges efter Servicelovens § 112. Andre af produkterne kan man selv anskaffe eller møde på et aktivitets- eller plejecenter som led i en aktivitet.

Der vil løbende ske udskiftninger af produkterne, både i kataloget og i vores udstilling.

Priserne skal opfattes som vejledende. Søg opdaterede oplysninger på [www.hmi-basen.dk](http://www.hmi-basen.dk) eller kontakt leverandøren.